


# エアロスフィア(ビレーズトリ・ビベスピ)

## デバイス各部位の名称と注意点

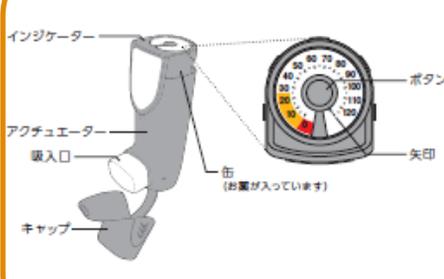

- ※ プッシュサポーター（吸入補助具）は原則使用しません
- ※ インジケーターの残数を確認します
- ※ 本体を親指、人差し指と中指で支えて持ちます（上下注意）
- ※ 背筋を伸ばして胸をはりまっすぐ前を向きます

プッシュサポーターを調剤時都度添付しない場合、捨ててしまっていないか確認してください  
小窓表示、アクチュエーターの洗浄についてはメーカー製リーフレットを併用してください

操作方法		ポイント
①吸入準備		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 使用回数が残っていることを確認します</li> <li>□ キャップの左右を持って外します</li> <li>□ 吸入器をよく振ります</li> </ul>
②息吐き		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 軽く息を吐いてから吸入口をくわえます</li> </ul>
③吸入		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 息を吸いながらボタンを押し、薬剤をゆっくり深く吸い込みます</li> </ul>
④息止め		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ □から本体を離して、苦しくない程度（5秒程度）息止めます</li> </ul>
⑤息吐き		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 息をゆっくり吐き出します</li> </ul>
⑥繰り返し		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ ①－⑤を指示された回数繰り返します（通常1日2回、1回2吸入）</li> </ul>
⑦後片付け		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 吸入口を拭いて、キャップを閉めます</li> </ul>
⑧うがい		<ul style="list-style-type: none"> <li>□ ブクブク：くちの中、ガラガラ：のど、の各3回ずつを目安にうがいをします</li> </ul>
(初回、洗浄後) 空うち	 <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 10px auto;"> <p>2回 空噴霧</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 1.キャップを外し吸入器をよく振ります</li> <li>□ 2.ボタンを押して空噴霧します</li> <li>□ 3.1と2を2回繰り返します</li> </ul>